

FFP2 VICTORIA

Cod. **151138**

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto FFP2



Specifiche:

- Monouso
- Stringinaso invisibile cucito internamente
- Saldatura mascherina ed elastici a ultrasuoni
- Capacità di arresto degli odori
- Non lavabile
- Imbustata singolarmente
- Peso: 10 g ca.
- Colore: nero
- Mascherina neutra

Imballaggio:

Scatola 50 pezzi

Cartone da 15 scatole

FFP2 VICTORIA

Mascherina realizzata completamente in Italia, con materiali di qualità, estremamente confortevole. Viene realizzata attraverso un selettivo e accurato processo di produzione e controllo, garantendo così elevati standard di qualità del prodotto.

Lo strato filtrante ad alta efficienza è racchiuso da due strati protettivi più uno strato confortevole "skin friendly" a contatto col viso. Ha inoltre capacità di protezione da odori non tossici, nè nocivi, nè irritanti.

| Composizione | Corpo filtrante | |
|-------------------------------------|---|---|
| | Strato 1 | Polipropilene tessuto non tessuto spunbond bianco (50 g/m ²) |
| | Strato 2 | Tessuto non tessuto antibatterico filtrante meltblown bianco (25 g/m ²) |
| | Strato 3 | Tessuto non tessuto antibatterico filtrante meltblown bianco (25 g/m ²) |
| | Strato 4 | Polipropilene tessuto non tessuto spunbond bianco (30 g/m ²) |
| | Stringinaso | |
| | Doppio filo d'acciaio rivestito in plastica | |
| | Elastici orecchie | |
| Nastro elasthan rivestito in cotone | | |

Campi d'impiego:

Faccie filtrante con protezione da particolati solidi (polveri) o liquidi (nebbie) senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione. Conforme alla Norma EN 149:2001+A1:2009 – FFP2 NR, con efficienza maggiore o uguale al 94%.

Info Tecniche

| | |
|----------------|---|
| Articolo | MFFP2 |
| Codice | 151138 |
| Colore | nero |
| Categoria | Protezione delle vie respiratorie |
| Certificazioni |  EN 149: 2001+A1:2009 FFP2 NR |

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

Conforme alla Norma **EN 149:2001+A1:2009 - FFP2 NR**, con efficienza maggiore o uguale al 94%.

Facciale filtrante con protezione da particolati solidi (polveri) o liquidi (nebbie) senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposizione.

La mascherina FFP2 non deve essere usata per la lotta antincendio. Questo tipo di respiratore non fornisce ossigeno. Non usare in ambienti esplosivi. Uso limitato a personale qualificato e correttamente addestrato. La tenuta sul viso non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con barba lunga o mai rasata.

NON usare questi respiratori o non entrare né permanere in zone dove:

- la concentrazione d'ossigeno è inferiore a 17%;
- i contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per la salute o la sicurezza;
- la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il fattore nominale di protezione;
- vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione superiore al TLV.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il facciale filtrante e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**.

Prendere un nuovo facciale filtrante.

Conservazione e smaltimento

Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all'interno della propria confezione in luogo asciutto con umidità relativa massima <80% a temperatura compresa tra -20°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore); non riutilizzare. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell'ambiente dopo l'uso. Smaltire in conformità alle norme di legge locali di gestione dei rifiuti.

Avvertenze

Controllare l'integrità della semimaschera prima dell'uso. Sostituire la semimaschera immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria, se la semimaschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può ridurre l'efficienza della semimaschera. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione.

Note

I facciali filtranti essendo monouso devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com